



Bitte beachten Sie die nachfolgenden Punkte, um eine sachgerechte Bearbeitung der Urinprobe zu gewährleisten:

- Nehmen Sie den Versand bitte ausschließlich **nach 12 Uhr und nur zwischen Montag und Donnerstag** vor. Bitte beachten Sie die Feiertage. Der Versand darf nicht am Vortag eines Feiertages oder über das Wochenende erfolgen, da die Kühlkapazität des Akkus nur für maximal 24 Stunden ausgelegt ist.
- Führen Sie die Probennahme gemäß der beiliegenden Gebrauchsanweisung durch.
- Legen Sie die gefüllte Urin-Monovette (Urinprobe) und den Kühlakku sofort nach der **Probennahme bis zur Abholung** getrennt voneinander für mindestens 24 Stunden in ein \*\*\* Gefrierfach (-18°C).
- Benachrichtigen Sie bitte **nach mind. 24 Stunden** den Expressdienst UPS unter der unten genannten Telefonnummer
- Bitte stecken Sie kurz vor Abholung die Urinmonovette in den Kühlakku und diesen wiederum in die Styroporbox. Anschließend legen Sie die Styroporbox zusammen mit den Dokumenten (Anamnesefragebogen und Vertrag) in den Versandkarton.
- Bitte kleben Sie den beiliegenden Frachtbrief von UPS auf das Paket.
- Verschließen Sie das Paket mit den Einstecklaschen und versiegeln Sie dieses mit den beiliegenden gelben Siegelaufklebern.

**Deutschland: 0800 - 8826630 (14ct / min)**  
 Der Versand erfolgt über unsere UPS-Kundennummer: 10V82A